

## 故障及簡易排除問題

- 電源打開時電源後會顯示藍色燈光，如燈光無發亮請先行確認電源是否正確連接。
- 若使用中電源不斷閃爍，或是忽亮忽暗，請確認插座是否鬆脫，如未能改善，請聯絡開發商。
- 收納及使用中請勿長時間重壓或使用尖銳物於本裝置，如遇燈源不亮時切勿自行拆解，請聯絡開發商。
- 連接行動電源時，請確認行動電源電量充足。  
\* 請確認行動電源是否具有3A以上。

## 建議使用方式

- 建議一天使用次數為2-3次。
- 使用時切勿於高濕度、高溫或水中使用，以免造成設備損壞。
- 如有使用上疑慮或問題可諮詢開發商或於官網上參考教學影片。
- 裝置開啟時，切勿眼睛直視或直接照射眼球。

## 注意事項

- 本產品如為多寵物共同使用，可使用酒精或清水簡單擦拭其布料，以維護衛生。
- 罹患傳染病時切勿交叉相互使用。

## 聯絡我們

開發商：賈伯科技股份有限公司  
地址：台北市大安區仁愛路四段29-2號3樓  
客服信箱：service@medtech123.com.tw  
製造商：仁齊企業有限公司新莊廠  
製造商地址：新北市新莊區幸福東路57號



## 產品規格

產品規格	
產品規格	20x42cm
LED燈源	204顆LED燈源
LED波長	450±10nm~660±10nm及940±10nm
輸入電壓	DC5V
最大功率	15W
開關模式	電源按鍵長壓開關
調整方式	輕按調整控制
照射模式	開關鈕： • 藍色-450 nm + 660 nm + 940nm • 綠色-660 nm + 940nm • 紅色-450nm 脈衝調整鈕： • 藍色-無脈衝模式 • 綠色-10Hz脈衝模式 • 紅色-40Hz脈衝模式
安全定時關機設置	30分鐘
產品配件	• DC5V USB-Type C線 • 美規110V轉接插頭(AC110-240V轉DC 5V/3A) • 綁帶(8 cm X 90 cm)
建議使用次數	2-3次(一天)
原廠保固期限	一年



MedTech123



## 碳量子點寵物 光動力治療墊



www.MedTech123.com.tw

# 產品介紹

## MedTech123碳量子點寵物光動力治療墊

是專為您的毛孩設計的高科技保健照護產品，適用於各類寵物。這款光動力治療墊使用可變波長及新材料碳量子點技術結合應用，適用於各類寵物消毒殺菌、保健護理和傷口照護。

### 產品特色

本產品採用碳量子點與LED技術結合，開發出新世代安全又有效的光動力治療居家設備，多種波段的結合進一步提升其功效。

- 450nm：消毒殺菌。
- 660nm：傷口照護。
- 940nm：血液循環保健照護。
- 10Hz脈衝光：強化瞬間效果。
- 40Hz脈衝光：神經保健。

MedTech123碳量子點光動力治療墊不含任何有害物質，讓您的毛孩可以安心使用。

操作簡便，只需將光療墊放置於患處，啟動開關即可進行保健照護。

適用於各種寵物保健照護，包括消毒殺菌、傷口照護、術後照護及血液循環保健等，讓您的毛孩迅速重拾活力。

我們的光療墊精選台灣醫療器材廠製造，確保品質優良安全可靠。產品獲得獸醫專家及用戶推薦，我們始終將方便、安全及健康放在首位，確保您和毛孩的滿意。

# 安裝及操作說明

圖示說明按鈕 \* 產品只適合3A以上的行動電源。

1. USB線插入裝置電源孔處。
2. USB頭插入行動電源或者連同變壓轉接頭插入家用110V電源孔。
3. 將治療墊放置需要治療部位，並依照需求選擇使用快拆式綁帶固定。
4. 長壓電源開關按鈕，即可開機。



5. 右邊按鈕為不同的波長組合，針對不同需求調整按鈕選擇使用。

按鈕顏色	脈衝模式
	無脈衝光
	強化瞬間效果 (10Hz)
	神經保健 (40Hz)
	回無脈衝光

# 碳量子點技術

碳量子點具有無毒、環保及安全等優點，在光療過程中給予寵物最安全且優質的保健照護，不需要擔心設備衰退對寵物造成傷害，賈伯科技碳量子點使用循環材料進行製造，產品使用過程也考慮到了綠色環保問題，不讓有害物質危害我們自身及環境安全。

6. 左邊按鈕為脈衝功能，可選擇開啟模式。
7. 每次啟動使用，光療墊自動設置30分鐘後自動關閉。
8. 需提前關閉請長壓電源開關鈕即可關閉設備。

按鈕顏色	波長 ( 定時30分鐘 )
	450+660+940nm 消毒殺菌、傷口照護、血液循環保健照護
	660+940nm 傷口照護、血液循環保健照護
	450nm 消毒殺菌
	回450+660+940nm